

GEBRUIKSAANWIJZING

SNOWPOST®, SNOWLIGHT®, CARBOPOST®



I - Kroon voorbereiden

1. Ondersnijdingen aan de buitenkant van de kroon wegnemen.
2. Verwijder zwakke kroonmuren, reinig de caviteit met behoud van alle gezonde dentine. Binnen-ondersnijdingen moeten niet worden verwijderd.
3. Prepareer de core form (matrix), gingivaal en in hoogte.

II - Kanaal en stift voorbereiden.

1. Prepareer het wortelkanaal zoals gewoonlijk (Gates, Largos).
2. Eindig met de bijhorende kallibreerboor van de gekozen stift-diameter.

De stift wordt gekozen volgens de diameter van het kanaal en niet volgens deze van de wortel.

3. Pas de stift aan, snij op de passende lengte buiten de mond met een diamantschijf.
- Verwijder eventueel resterend endodontisch eugenol met een etsmiddel, reinig de stift met alcohol; de tand en het kanaal reinigen, spoelen en drogen.

III - Cementeren van de stift.

Lees zorgvuldig de specifieke gebruiksaanwijzingen van het gekozen bonding- en/of cementsysteem.

1. Prepareer de primer, breng aan over de gehele lengte van de stift, het wortelkanaal en de wanden van de krooncaviteit.
2. Prepareer het composietcement en breng aan op de stift.
3. Breng de stift in het kanaal; zijn er meerdere stiften, prepareer en plaats de stiften één per één, na elkaar.

IV - Kroonopbouw.

1. Plaats de matrix.
2. Breng zeker ook cement aan op het in de caviteit uitstekende deel van de stift en op de wanden van de caviteit.
3. Breng het gekozen opbouwcomposiet al drukkend aan en polymeriseer.

De restauratie is gereed en kan voorbereid worden voor de afdruk.

 **abrasive technology**
www.abrasive-tech.com



WORLD HEADQUARTERS
United States
Ph: 1.740.548.4100
Fax: 1.740.548.7617

EUROPEAN HEADQUARTERS
United Kingdom
Ph: 44.20.7471.0200
Fax: 44.20.7471.0202

ASIAN HEADQUARTERS
Singapore
Ph: 65.6270.6878
Fax: 65.6270.6877