

## SNOWPOST®, SNOWLIGHT®, CARBOPOST®

## INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO



### I - Prepare a coroa

1. Corte por baixo as paredes externas da coroa.
2. Elimine as paredes residuais mais fracas, limpe a cavidade preservando toda a dentina saudável: os cortes por cima não precisam ser eliminados.
3. Prepare o encaixotamento do molde do engaste, ajuste-o no colar observando a altura.

### II - Prepare o canal e o pino

1. Prepare o canal da raiz de acordo com o procedimento de rotina (Gates, Largos).
  2. Complete com a broca de acabamento adequada para o pino selecionado: **O pino deve ser selecionado de acordo com o diâmetro do canal, não com o da raiz.**
  3. Experimente o pino, corte-o fora da boca, na altura requerida, com um disco de diamante.
- Elimine o ácido eugênico endodôntico residual com um agente cáustico, limpe o pino com álcool, limpe, lave e seque tanto o dente como o canal.

### III - Isole o pino

**Leia com atenção as instruções e específicas para utilização do primer de ligação e do cimento composto.**

1. Prepare o primer de ligação, aplique-o sobre o pino, canal da raiz e paredes da cavidade coronal.
2. Prepare o cimento de ligação composto, cubra o pino com uma camada do mesmo.
3. Introduza o pino no canal, caso haja mais de um pino, cubra e introduza um após o outro.

### IV - Encha a cavidade coronal

1. Coloque o sistema de encaixotamento do molde do engaste
2. Cubra a parte superior do pino e as paredes da cavidade coronal com o cimento restante.
3. Encha até em cima com o composto de engaste escolhido, enquanto pressiona e faz a polimerização.

**A reconstrução está agora terminada,  
a preparação poderá ser feita diretamente.**

**abrasive technology**  
[www.abrasive-tech.com](http://www.abrasive-tech.com)



WORLD HEADQUARTERS  
United States  
Ph: 1.740.548.4100  
Fax: 1.740.548.7617

EUROPEAN HEADQUARTERS  
United Kingdom  
Ph: 44.20.7471.0200  
Fax: 44.20.7471.0202

ASIAN HEADQUARTERS  
Singapore  
Ph: 65.6270.6878  
Fax: 65.6270.6877